


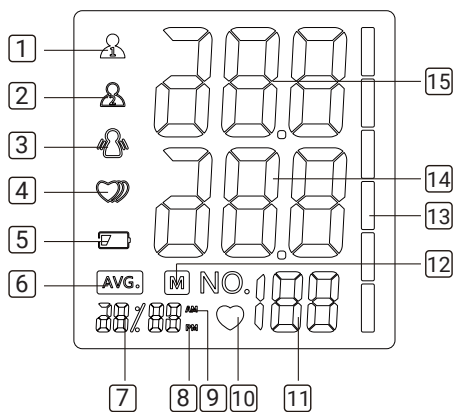

- 1 Utente 1
- 2 Utente 2
- 3 Simbolo di errore di movimento
- 4 Simbolo di battito cardiaco irregolare
- 5 Simbolo batteria scarica
- 6 Simbolo valore medio
- 7 Visualizzazione data/ora
- 8 Simbolo PM
- 9 Simbolo AM
- 10 Simbolo battito cardiaco
- 11 Visualizz. del polso / Numero Memoria
- 12 Simbolo memoria
- 13 Segmento OMS dispositivo
- 14 Pressione diastolica
- 15 Pressione sistolica

Caratteristiche del prodotto

- Visualizzazione data/ora
- Doppio utente: memoria 2x120 misurazioni
- Funzione valore medio
- Rilevamento del battito irregolare
- Funzione scala OMS
- Indicatore batteria scarica
- Spegnimento automatico
- Rilevamento dei movimenti del corpo

PRIMO UTILIZZO DEL MISURATORE

Installazione delle batterie

Utilizzare esclusivamente batterie alcaline da 1,5 V tipo "AAA" con questo dispositivo.

1. Aprire il coperchio delle batterie premendo con il pollice sulla sporgenza nella direzione opposta al display.
2. Inserire 2 batterie formato "AAA" assicurandosi che le polarità + (positivo) e - (negativo) corrispondano a quelle indicate nel vano batterie. Dopo l'inserimento, richiudere il coperchio delle batterie. Assicurarsi che il coperchio sia ben fissato in posizione.

Sostituzione delle batterie

Indicatore di batteria scarica

1. Quando sul display compare l'indicatore di batteria scarica, spegnere il misuratore e rimuovere tutte le batterie.

Sostituire con 2 batterie nuove.

Si consiglia l'uso di batterie alcaline a lunga durata.

2. Per evitare danni al dispositivo causati da eventuali perdite di liquido dalle batterie, rimuovere le batterie se il misuratore non viene utilizzato per un lungo periodo (in genere oltre 3 mesi). Se il liquido delle batterie entra in contatto

con gli occhi, sciacquare immediatamente con abbondante acqua pulita e contattare subito un medico.

3. Smaltire il dispositivo, i componenti e gli accessori opzionali in conformità alle normative locali vigenti.

Uno smaltimento non corretto può provocare inquinamento ambientale.

Impostazioni di sistema

Prima di procedere alle impostazioni, assicurarsi che tutte le batterie siano state inserite correttamente.

Impostazione dell'ID utente (1 o 2)

Con l'unità spenta, premere il pulsante **SET**: sarà possibile selezionare l'ID utente premendo nuovamente il pulsante **SET**.

Impostazione anno/mese/data/ora

Con l'unità spenta, tenere premuto il pulsante **SET** per più di 3 secondi per avviare la procedura di impostazione.

Impostazione dell'anno

Quando l'indicazione dell'anno lampeggia, premere ripetutamente il pulsante **MEM**: il valore aumenterà di uno alla volta fino ad arrivare al 2049, per poi tornare all'anno iniziale. Una volta selezionato l'anno corretto, premere il pulsante **SET** per confermare.

Impostazione di mese/data

Le impostazioni iniziali di mese/data/giorno sono 1/01.

Quando il valore del mese lampeggia, premere il pulsante **MEM**: il mese aumenterà di 1 alla volta.

Premere **SET** per confermare e procedere con l'impostazione della data.

Impostare la data nello stesso modo: premere **MEM** per aumentare il valore e premere **SET** per confermare.

Impostazione del formato orario

Il formato orario predefinito è 12 ore.

Premere il pulsante **MEM** per passare dal formato 12 ore al formato 24 ore.

Premere **SET** per confermare.

Impostazione dell'ora

Quando il valore delle ore lampeggia, premere il pulsante **MEM**: le ore aumenteranno di 1 alla volta.

Premere **SET** per confermare e procedere con l'impostazione dei minuti.

Impostare i minuti nello stesso modo: premere **MEM** per aumentare il valore e premere **SET** per confermare.

Al termine della procedura, il dispositivo si spegne automaticamente e salva le impostazioni.

Nota: dopo lo spegnimento del dispositivo, se si reinseriscono le batterie, il monitor mostrerà nuovamente l'interfaccia di impostazione.

PROCEDURA DI MISURAZIONE

Prima della misurazione

- Evitare di mangiare, fumare o svolgere qualsiasi attività fisica subito prima della misurazione. Questi fattori possono influenzare il risultato.


- Prendersi qualche minuto per rilassarsi sedendosi in un ambiente tranquillo per circa dieci minuti prima della misurazione.

- Rimuovere qualsiasi indumento che aderisca al polso.

- Effettuare sempre la misurazione sullo stesso polso (normalmente il sinistro).

Applicazione del bracciale

Fare riferimento all'immagine.

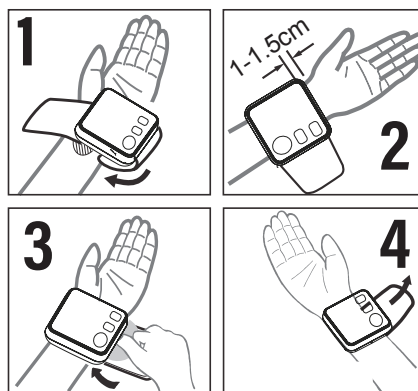

Rimuovere anelli, bracciali e orologi. Il palmo della mano deve essere rivolto verso l'alto. Posizionare il bracciale in modo che il display sia rivolto verso l'utente.

2. La distanza tra il bordo del bracciale e la mano deve essere di circa 1 cm.

3. Fissare il bracciale con la chiusura a strappo regolando la tensione: il bracciale deve aderire comodamente, senza risultare troppo stretto.

4. Appoggiare l'avambraccio su un tavolo con il palmo verso l'alto. Se occorre, sostenere il braccio con un cuscino in modo che il bracciale si trovi all'altezza del cuore.

Restare fermi per 2 minuti, seduti in tranquillità, prima di iniziare la misurazione.

Procedura di misurazione

Il dispositivo è progettato per effettuare le misurazioni e memorizzare i risultati per due utenti diversi, tramite ID Utente 1 e ID Utente 2.

1. Sedersi comodamente su una sedia, con i piedi ben appoggiati al pavimento.
 2. Selezionare il proprio ID utente (1 o 2).
- Allungare il braccio sul tavolo mantenendo una posizione rilassata, con il palmo della mano rivolto verso l'alto. Assicurarsi che il polso sia posizionato correttamente ed evitare movimenti del corpo. Restare fermi, senza parlare o muovere il braccio durante la misurazione. Dopo aver posizionato correttamente il bracciale sul polso, è possibile iniziare la misurazione.

Utilizzo del dispositivo

1. Premere il pulsante **START/STOP**.

La pompa inizia a gonfiare il bracciale. Sul display viene mostrata in continuo la pressione crescente del bracciale.

2. Dopo aver raggiunto automaticamente una pressione adeguata, la pompa si arresta e la pressione diminuisce lentamente.

La pressione del bracciale viene mostrata

sul display durante questa fase.

3. Quando il dispositivo rileva il battito cardiaco, il simbolo del cuore sul display inizia a lampeggiare.

4. Al termine della misurazione, vengono visualizzati i valori misurati di pressione sistolica, diastolica e frequenza del polso.

5. Dopo che il misuratore ha rilevato la pressione arteriosa e la frequenza del polso, il bracciale si sgonfia automaticamente. La pressione sanguigna e la frequenza cardiaca vengono visualizzate sul display.
6. I risultati della misurazione rimangono visibili fino allo spegnimento dell'apparecchio.

Nota: se non viene premuto alcun pulsante per 60 secondi, il dispositivo si spegne automaticamente.

Simbolo di errore di movimento

Il simbolo di errore di movimento viene mostrato se si verifica un movimento del corpo durante la misurazione. Rimuovere il bracciale e attendere 2-3 minuti.

Quindi riposizionare correttamente il bracciale ed effettuare una nuova misurazione.

Nota

Posizione del paziente:

1. Seduto comodamente
2. Gambe non incrociate
3. Piante dei piedi appoggiate a terra
4. Schiena ben sostenuta
5. Mettere il centro del bracciale all'altezza dell'atrio destro del cuore

Metodi di utilizzo raccomandati

1. Il paziente deve rilassarsi il più possibile ed evitare di parlare durante la procedura di misurazione.
2. È consigliabile attendere 5 minuti prima di effettuare una seconda misurazione.
3. Ogni misurazione può essere influenzata dal punto in cui viene effettuata, dalla posizione del paziente, dall'attività fisica o dalle condizioni fisiologiche del paziente.
4. Le prestazioni dello sfigmomanometro automatico possono essere alterate da temperature estreme, umidità e altitudine.
5. Per interrompere il gonfiaggio o la misurazione, premere il pulsante **START/STOP**. Il misuratore interromperà il gonfiaggio, inizierà a sgonfiarsi e si spegnerà.



Rilevatore di battito cardiaco irregolare

Questo dispositivo è un misuratore di pressione oscillometrico che analizza anche la frequenza del polso durante la misurazione. Lo strumento è clinicamente testato. Se durante la misurazione si verificano irregolarità del battito, al termine comparirà il simbolo di battito cardiaco irregolare . Se il simbolo appare con maggiore frequenza (ad esempio più volte alla settimana durante misurazioni quotidiane) oppure se compare all'improvviso più spesso del normale, si consiglia al paziente di consultare un medico. Lo strumento non sostituisce un esame cardiologico, ma consente di rilevare precocemente eventuali irregolarità del battito.

INDICAZIONI DI ERRORE

Il seguenti simboli appaiono sul display quando la misurazione risulta anomala.

SIMBOLO	CAUSA	SOLUZIONE
NESSUNA VISUALIZZAZIONE	Batteria debole o installazione errata	Sostituire entrambe le batterie con batterie nuove. Controllare l'installazione per verificare il corretto posizionamento delle polarità.
ER1	Errore del sensore	Controllare se la pompa funziona correttamente. Se funziona, il problema riguarda il sensore. Rivolgersi al distributore locale.
ER2	Il misuratore non riesce a rilevare il valore del polso o non può calcolare i dati della pressione arteriosa	Posizionare correttamente il bracciale sul polso e ripetere la misurazione. Se l'errore persiste, rivolgersi al distributore locale.
ER3	I risultati della misurazione sono anormali o fuori dall'intervallo misurabile della pressione	Restare calmi e ripetere la misurazione.
ER4	Bracciale troppo lento o perdita d'aria	Stringere il bracciale correttamente e ripetere la misurazione.
ER5	Il tubo dell'aria è piegato o il bracciale è troppo stretto	Correggere la posizione e ripetere la misurazione.
ER6	Il sensore rileva forti oscillazioni della pressione	Restare calmi e non muoversi
ER7	La pressione rilevata dal sensore supera il limite consentito	Avviare nuovamente la misurazione. Se l'errore persiste, rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato.
ER8	La demarcazione è errata oppure il dispositivo non è stato calibrato	Rivolgersi ad un centro di assistenza autorizzato
HI	La frequenza del polso supera il limite superiore (> 180 battiti al minuto)	Valore fuori dall'intervallo misurabile, promemoria normale
LO	La frequenza del polso è inferiore al limite inferiore (< 40 battiti al minuto)	Valore fuori dall'intervallo misurabile, promemoria normale

RISOLUZIONE PROBLEMI

PROBLEMA	COSA CONTROLLARE	SOLUZIONE
NESSUNA ACCENSIONE	Controllare la carica delle batterie	Sostituire con batterie nuove
	Controllare la posizione delle polarità	Installare correttamente le batterie rispettando le polarità
ERRORE O ARRESTO DURANTE IL FUNZIONAMENTO	Controllare se il braccio viene mosso durante il gonfiaggio	Mantenere il corpo fermo
	Verificare se si parla durante la misurazione	Rimanere in silenzio durante la misurazione
PERDITA D'ARIA DEL BRACCIALE	Controllare se il bracciale è troppo lento	Stringere correttamente il bracciale
	Verificare se il bracciale è danneggiato	Sostituire il bracciale con uno nuovo

Nota: Se il problema persiste, contattare il distributore. Non smontare il dispositivo autonomamente

DESCRIZIONE DEI SIMBOLI

I seguenti simboli possono comparire in questo manuale, sul misuratore digitale di pressione W1701 o sui relativi accessori. Alcuni simboli indicano norme e conformità applicabili al misuratore digitale di pressione W1701 e al suo utilizzo.

	Indica che l'utilizzatore deve leggere attentamente il manuale di istruzioni prima di utilizzare il dispositivo, al fine di garantire un uso corretto e sicuro del prodotto.		Indica la parte applicata di tipo BF (protezione contro le scosse elettriche)
	Indica che il dispositivo è conforme ai requisiti della normativa applicabile sui dispositivi medici (regolamento MDR EU 2017/745) e che è autorizzato alla immissione sul mercato nell'Unione Europea		
	Indica che il prodotto non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani indifferenziati. Lo smaltimento deve essere effettuato secondo quanto previsto dalla Direttiva (UE) 2012/19 sui RAEE e dal D.Lgs. 14 marzo 2014 n. 49, e successive modifiche. Il rifiuto deve essere oggetto di "raccolta separata": i dispositivi elettrici ed elettronici non devono essere considerati rifiuti domestici. Pertanto, il prodotto alla fine della sua vita utile, non deve essere smaltito insieme ai rifiuti urbani. L'utente dovrà conferire (o far conferire) il rifiuto ai centri di raccolta differenziata predisposti dalle amministrazioni locali, oppure consegnarlo al rivenditore contro l'acquisto di una nuova apparecchiatura di tipo equivalente.		
	Indica il fabbricante del dispositivo		Indica il soggetto autorizzato nell'Unione Europea a rappresentare il fabbricante,
	Indica il mese e l'anno in cui il dispositivo è stato fabbricato		Indica il numero di serie univoco assegnato al prodotto per la sua identificazione e tracciabilità.
	Indica che il dispositivo o parte di esso funziona con corrente continua (DC).		Identifica che l'oggetto è un dispositivo medico, in conformità alle norme vigenti sui dispositivi medici.
	Indica una situazione potenzialmente pericolosa che, se non evitata, può causare danni al dispositivo o rischi per l'utente. Seguire scrupolosamente le istruzioni di sicurezza riportate nel manuale.		

Nessun requisito di sterilizzazione
Apparecchiatura non appartenente alla categoria AP / APG
Modalità di funzionamento: continua

Memoria

Ogni unità memorizza 120 misurazioni per ciascun utente, per un totale di 240 memorie (Utente 1 e Utente 2). Le misurazioni vengono archiviate separatamente per ciascun utente. Assicurarsi di visualizzare i dati relativi all'utente corretto.

Visualizzazione della memoria

Con l'unità spenta, premere il pulsante **MEM**. Il misuratore visualizza l'ID utente e il valore medio delle ultime 3 misurazioni archiviate. (Se sono presenti meno di 3 misurazioni, viene visualizzata direttamente la prima disponibile.) Premendo il pulsante **MEM**, i valori memorizzati vengono visualizzati dal più recente al più vecchio. Premendo il pulsante **SET**, i valori vengono visualizzati dal più vecchio al più recente.


CANCELLAZIONE DELLA MEMORIA

In modalità di visualizzazione del valore medio, con il simbolo del valore medio  attivo, tenere premuto il pulsante **MEM** per 3 secondi: vengono cancellate tutte le misurazioni dell'utente corrente. In modalità di visualizzazione di una singola misurazione, tenere premuto il pulsante **MEM** per 3 secondi: viene cancellata soltanto la misurazione visualizzata. **Nota:** se si decide di cancellare tutte le memorie, conservare i dati con un altro metodo se ritenuti utili in futuro. La rimozione delle batterie non provoca la perdita dei dati memorizzati.

Interruzione della misurazione

Se è necessario interrompere la misurazione della pressione arteriosa (ad esempio in caso di malessere), premere il pulsante **START/STOP** in qualsiasi momento. Il dispositivo riduce immediatamente la pressione del bracciale in modo automatico. **5.8 Indicatore batteria scarica**
Batterie scariche – sostituzione necessaria
Quando le batterie sono scariche, il simbolo della batteria lampeggia all'accensione dell'unità. In questa condizione non è possibile effettuare ulteriori misurazioni ed è necessario sostituire le batterie. Il vano batterie si trova sul retro dell'unità.
1. Rimuovere il coperchio
2. Inserire le batterie (2 × AAA). Utilizzare sempre batterie AAA a lunga durata o alcaline da 1,5 V.
3. La memoria mantiene tutti i valori; tuttavia, data e ora devono essere reimpostate. Dopo la sostituzione delle batterie, il valore dell'anno lampeggia automaticamente.
4. Per impostare data e ora, seguire la procedura

descritta nella **SEZIONE IMPOSTAZIONI DI SISTEMA**.

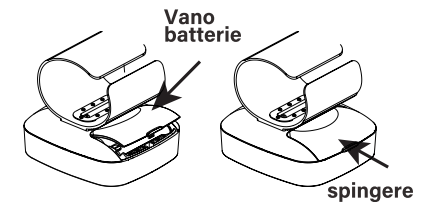

CURA E MANUTENZIONE

Lavare le mani dopo ogni misurazione. Se il dispositivo è utilizzato da più persone, lavare le mani prima e dopo ogni utilizzo.
1. Non esporre il dispositivo a temperature estreme, umidità elevata, polvere o luce solare diretta.
2. Il bracciale contiene una camera d'aria sensibile. Maneggiarlo con attenzione ed evitare qualsiasi tipo di torsione o piegatura che possa danneggiarlo.
3. Pulire il dispositivo con un panno morbido e asciutto. Non utilizzare gas, solventi o detergenti simili. Le macchie sul bracciale possono essere rimosse con un panno leggermente umido e sapone neutro. Il bracciale con camera d'aria non deve essere lavato in lavastoviglie, lavatrice né immerso in acqua.
4. Non far cadere il misuratore e non sottoporlo a urti o vibrazioni.
5. Non aprire l'unità. L'apertura invalida la garanzia del produttore.
6. Smaltire il dispositivo e le batterie in conformità alle normative locali applicabili; non smaltire con i rifiuti domestici.

VERIFICA DI ACCURATEZZA

I dispositivi di misurazione devono essere controllati periodicamente per garantirne l'accuratezza. Per assistenza, contattare il distributore.

CERTIFICAZIONI

Standard del dispositivo:
Questo dispositivo è prodotto in conformità agli standard per misuratori della pressione arteriosa: IEC 80601-2-30 / IEC 60601-1-11 / IEC 60601-1
Compatibilità elettromagnetica:
Il dispositivo è conforme alle disposizioni della norma internazionale IEC 60601-1-2.
Il dispositivo è stato clinicamente valutato e la sicurezza ed efficacia soddisfano i requisiti della norma ISO 81060-2. Per ottenere una copia del sommario dell'Investigazione Clinica, contattare il produttore.

SPECIFICHE TECNICHE

Modello: W1701 • Peso: 106,8 g (batterie escluse)
Display: 44 × 43 mm (1,73" × 1,69") – Display LCD digitale
Dimensioni: 79 (L) × 67,6 (P) × 22,6 (H) mm

 Shenzhen Jamr Technology Co., Ltd. A101-301, D101-201, Jamr Science & Technology Park, No. 2 Guiyuan Road, Guixiang Community, Guanlan Street, Longhua District, 518100 Shenzhen, PEOPLE'S REPUBLIC OF CHINA

 Shanghai International Holding Corp. GmbH (Europe) Eiffestrasse 80, 20537 Hamburg, GERMANY

ACCESSORI:

1 × unità principale, 1 × bracciale, 1 × manuale utente

CONDIZIONI DI UTILIZZO
Temperatura: 5°C – 40°C
Umidità: 15% – 93% RH
Condizioni di stoccaggio e trasporto
Temperatura: -25°C – 70°C
Umidità: ≤ 93% RH
Pressione atmosferica operativa: 70 kPa – 106 kPa
Metodo di misurazione: Oscillometrico
Sensore di pressione: Resistivo

CAMPO DI MISURAZIONE

Pressione diastolica (DIA)	40 – 130 mmHg
Pressione sistolica (SYS)	60 – 230 mmHg
Frequenza del polso	40 – 180 battiti/minuto
Campo di pressione del bracciale:	0 – 295 mmHg
Memoria:	Archivia automaticamente le ultime 120 misurazioni per 2 utenti (totale 240)
Risoluzione di misura:	1 mmHg

ACCURATEZZA

- Pressione: ± 3 mmHg
- Frequenza del polso: ± 5% del valore misurato

Alimentazione: 2 × batterie AAA, 1,5 V
Bracciale: 12,5 – 21,5 cm (4.92" – 8.46")
Utenti: Adulti
Durata prevista del dispositivo: 5 anni
NOTA Il produttore si riserva il diritto di apportare modifiche tecniche senza preavviso.

DICHIARAZIONE EMC
L'APPARECCHIATURA ME O IL SISTEMA ME È IDONEO ALL'USO IN AMBIENTI SANITARI DOMESTICI E SIMILI.
ATTENZIONE:
Non utilizzare l'apparecchiatura vicino a strumenti chirurgici ad alta frequenza (HF) né all'interno di sale schermate per risonanza magnetica (MRI), dove l'intensità delle interferenze elettromagnetiche può essere elevata.
ATTENZIONE:
L'uso dell'apparecchiatura in prossimità o a contatto con altra strumentazione deve essere evitato, poiché potrebbe causare un funzionamento anormale.
Se l'uso simultaneo è necessario, verificare che entrambi gli strumenti funzionino correttamente.
ATTENZIONE:
L'utilizzo di accessori, trasduttori o cavi diversi da quelli specificati o forniti dal produttore può aumentare le emissioni elettromagnetiche o ridurre l'immunità elettromagnetica dell'apparecchiatura, causando un funzionamento non corretto.

ATTENZIONE: Le apparecchiature di comunicazione RF portatili (inclusi cavi d'antenna e antenne esterne) devono essere mantenute ad almeno 30 cm (12") da qualsiasi parte del Misuratore di Pressione W1701, inclusi i cavi specificati dal produttore.
Una distanza minore può causare un degrado delle prestazioni dell'apparecchiatura.
Dichiarazione EMC – Informazioni aggiuntive
Se presenti, l'elenco di tutti i cavi e delle lunghezze massime dei cavi (se applicabile), dei trasduttori e degli altri ACCESSORI sostituibili dall'ORGANIZZAZIONE RESPONSABILE e che possono influenzare la conformità dell'APPARECCHIATURA ME o del SISTEMA ME ai requisiti della Clausola 7 (EMISSIONI) e della Clausola 8 (IMMUNITÀ), può essere specificato in modo generico (es. cavi schermati, impedenza di carico) oppure in modo specifico (es. riferimento al PRODUTTORE, al TIPO DI APPARECCHIATURA o al MODELLO).
Se presenti, le prestazioni dell'APPARECCHIATURA ME o del SISTEMA ME considerate ESSENZIALI e la descrizione di ciò a cui l'OPERATORE può andare incontro in caso di perdita o degrado della PRESTAZIONE ESSENZIALE dovuta a DISTURBI ELETTROMAGNETICI devono essere indicate. (Il termine "PRESTAZIONE ESSENZIALE" non deve essere utilizzato quando non richiesto.)

DESCRIZIONE TECNICA

- Tutte le istruzioni necessarie per mantenere la SICUREZZA DI BASE e la PRESTAZIONE ESSENZIALE in presenza di disturbi elettromagnetici durante l'intero ciclo di vita previsto.
- Linee guida e dichiarazione del produttore – emissioni ed immunità elettromagnetiche.

TABELLA 1 — LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - EMISSIONI ELETTROMAGNETICHE	
Test sulle emissioni	CONFORMITÀ
Emissioni RF CISPR 11	GRUPPO 1
Emissioni RF CISPR 11	CLASSE B
Armoniche IEC 61000-3-2	NON APPLICABILE
Fluttuazioni di tensione / sfarfallio IEC 61000-3-3	NON APPLICABILE

TABELLA 2 — LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA		
TEST DI IMMUNITÀ	LIVELLO DI PROVA IEC 60601-1-2	LIVELLO DI CONFORMITÀ
Scariche elettrostatiche (ESD) IEC 61000-4-2	±8 kV a contatto; ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria	±8 kV a contatto; ±2 kV, ±4 kV, ±8 kV, ±15 kV in aria
Transitori elettrici veloci/burst IEC 61000-4-4	Linee di alimentazione: ±2 kV; linee di ingresso/uscita: ±1 kV	Non applicabile
Sovratensioni (Surge) IEC 61000-4-5	Linee verso linea: ±1 kV; linea verso terra: ±2 kV	Non applicabile
Cadute di tensione, brevi interruzioni e variazioni sulla linea di alimentazione IEC 61000-4-11	0% a 0,5 cicli; 40% a 5/50 cicli; 70% a 25/250 cicli; 0% a 250/300 cicli	Non applicabile
Campo magnetico a frequenza di rete IEC 61000-4-8	30 A/m a 50 Hz	30 A/m
RF condotta IEC 61000-4-6	150 kHz – 80 MHz, 3 Vrms (cablaggi ISM e non-ISM) 80% AM a 1 kHz	Non applicabile
RF irradiata IEC 61000-4-3	80 MHz – 2,7 GHz, 10 V/m 80% AM a 1 kHz	10 V/m
Campi magnetici di prossimità IEC 61000-4-39	30 kHz, 18 A/m; 135 kHz, 18 A/m; 20 kHz, 12 A/m; 60 kHz, 58 A/m; 2,7 kHz, 75 A/m	30 kHz, 18 A/m 135 kHz, 18 A/m 20 kHz, 12 A/m 60 kHz, 58 A/m 2,7 kHz, 75 A/m

NOTA UT è la tensione nominale di alimentazione CA applicata durante il test.a

TABELLA 3 — LINEE GUIDA E DICHIARAZIONE DEL PRODUTTORE - IMMUNITÀ ELETTROMAGNETICA				
TEST RF IRRADIATA IEC 61000-4-3 (SPECIFICHE DI PROVA PER L'IMMUNITÀ DELL'INVOLUCRO ALLE APPARECCHIATURE DI COMUNICAZIONE WIRELESS RF)				
FREQUENZA DI PROVA (MHZ)	BANDA A) (MHZ)	SERVIZIO A)	MODULAZIONE A)	LIVELLO DI PROVA IMMUNITÀ (V/M)
385	380-390	TETRA 400	Modulazione a impulsi b) 18 Hz	27
450	430-470	GMRS 460, FRS 460	FM c) ±5 kHz, deviazione 1 kHz sinusoidale	28
710 745 780	704-787	LTE Banda 13, 17	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	9
810 870 930	800-960	GSM 800/900, TETRA 800, iDEN 820, CDMA 850, LTE Banda 5	Modulazione a impulsi b) 18 Hz	28
1720 1845 1970	2400-2570	GSM 1800; CDMA 1900; GSM 1900; DECT; LTE Bande 1, 3, 4, 25; UMTS	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	28
2450	2400-2750	Bluetooth, WLAN 802.11 b/g/n, RFID 2450, LTE Banda 7	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	28
5240	5100-5800	WLAN 802.11	Modulazione a impulsi b) 217 Hz	9

GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ
IL CONSUMATORE HA DIRITTO ALLA GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ SUI BENI DI CONSUMO COSÌ COME DISCIPLINATA DALLA NORMATIVA IN VIGORE NEL PAESE IN CUI IL PRODOTTO È ACQUISTATO. OVE IL PRODOTTO NON SIA CONFORME ALLA DESCRIZIONE, ALLA QUANTITÀ, ALLA QUALITÀ ED ALLE ALTRE CARATTERISTICHE CONTENUTE NEL CONTRATTO DI VENDITA, OVVERO PRESENTI DIFETTI O MALFUNZIONAMENTI, OPPURE ANCORA QUALORA LO STESSO NON SIA IDONEO ALLO SCOPO CUI È DESTINATO O NON PRESENTI LE QUALITÀ E LE ALTRE CARATTERISTICHE PROMESSE O CHE IL CONSUMATORE POSSA RAGIONEVOLMENTE ASPETTARSI IN QUANTO ORDINARIAMENTE PRESENTI IN UN BENE DEL MEDESIMO TIPO, IL CONSUMATORE POTRÀ RIVOLGERSI AL PROPRIO VENDITORE PER ESPERIRE I RIMEDI RICONOSCIUTI DALLA NORMATIVA IN MATERIA DI DIRITTI DEL CONSUMATORE E GARANZIA LEGALE DI CONFORMITÀ. SI CONSIGLIA DI CONSERVARE LA RICEVUTA D'ACQUISTO O ALTRO DOCUMENTO FISCALMENTE OBBLIGATORIO CHE ATTESTI L'AVVENUTA VENDITA, DANDO PROVA DELLA DATA D'ACQUISTO, IN QUANTO I PREDETTI DOCUMENTI POTREBBERO ESSERE RICHIESTI AI FINI DELL'OPERATIVITÀ DELLA PREDETTA GARANZIA LEGALE.

Per i prodotti acquistati direttamente dalla Galileo S.p.A., presso i Punti Vendita ad insegna SATUR o tramite il sito e-commerce www.satur.it, all'Acquirente-Consumatore (ossia, in qualità di persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta - cfr. art 3, comma 1, lett. a), D.lgs. 206/2005, Codice del Consumo), la Galileo S.p.A. garantisce la conformità del prodotto, rispetto ad eventuali difetti esistenti al momento della consegna del bene, per un periodo di 2 (due) anni. Questa consiste nel diritto per l'Acquirente-Consumatore al ripristino della conformità, ossia al diritto di richiedere la riparazione o sostituzione, senza spese, del bene o di sue componenti che siano risultate difettose all'origine per vizi di fabbricazione - a meno che la richiesta non sia oggettivamente impossibile da soddisfare o risulti eccessivamente onerosa per il venditore Galileo S.p.A. - ovvero, nei casi previsti, una riduzione del prezzo o la risoluzione del Contratto ai sensi del vigente Codice del Consumo. L'acquisto deve essere comprovato da scontrino fiscale o qualunque altra prova d'acquisto, che riporti il nominativo del Punto Vendita/numero d'ordine satur.it, la data di acquisto del prodotto nonché gli estremi identificativi dello stesso (tipo, modello). In assenza di alcuna prova d'acquisto, l'Acquirente potrebbe non avere diritto alla garanzia legale di conformità. Entro un anno dalla consegna del prodotto il difetto si ritiene esistente all'origine, successivamente deve esserne provata l'esistenza. Eventuali difetti estetici dovranno essere riscontrati e denunciati con immediatezza dopo l'acquisto. La predetta Garanzia Legale di Conformità non è operante in caso di:

- difetto di conformità del Prodotto o dei Prodotti manifestato oltre il termine di 2 (due) anni dalla consegna;
- materiali e/o componenti che, per la loro natura, sono soggetti ad usura, a meno che venga dimostrata la difettosità risalente a vizio di fabbricazione delle stesse;
- eventuali danni dovuti al trasporto o alla movimentazione delle merci salvo che tali servizi non siano stati contrattualmente previsti a carico del venditore Galileo S.p.A. In tal caso, si applicheranno le condizioni particolari di spedizione e trasporto;
- interventi errati di installazione e montaggio, così come l'errata connessione o errata erogazione dalle reti di alimentazione elettrica, mancanza di allacciamento alla presa di terra, e tutte le eventuali regolazioni errate, in caso di installazione errata, imperfetta o incompleta per incapacità d'uso da parte dell'utente o dell'installatore, riparazioni, modifiche o manomissioni effettuate da personale non idoneo, danni causati da agenti atmosferici (fulmini, terremoti, incendi, alluvioni, ecc.);
- guasti dovuti a mancanza di regolare manutenzione (pulizia batterie condensanti, fori di drenaggio acqua di condensa, filtri scarico ed entrata acqua, eliminazione corpi estranei, calcare ecc.) oppure qualora non vengano rispettate le indicazioni di conservazione e utilizzo degli stessi previste nei manuali, eccessive condizioni climatiche ambientali, etc.;
- eventuali problematiche legate esclusivamente al mancato rispetto delle aspettative soggettive del cliente, o usi impropri dell'apparecchio, non di tipo domestico o diverso da quanto stabilito dal produttore;
- circostanze esterne che non siano riconducibili a difetti di fabbricazione.

GALILEO S.P.A. – C.F./P.IVA IT08442821008, Capitale Sociale 550.000 i.v., REA RM-1094899
Strada Galli n. 27, 00019 Tivoli, Roma
Punto unico di contatto appositamente istituito per ogni comunicazione, reclamo, segnalazione,
richiesta di informazioni concernenti la sicurezza del prodotto: info@galileospa.com - sicurezza prodotto@galileospa.com